



## Инструкция по подключению манжет к монитору АД

Манжета подсоединяется к монитору АД с помощью пневмошланга следующим образом:


1. подсоедините длинную часть пневмошланга (1) к неразъемному штуцеру (2);

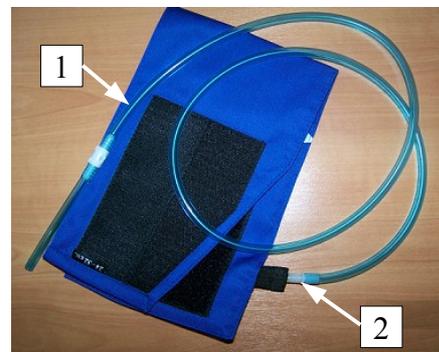

2. подсоедините короткую часть пневмошланга (1) к выходному штуцеру монитора АД (2);

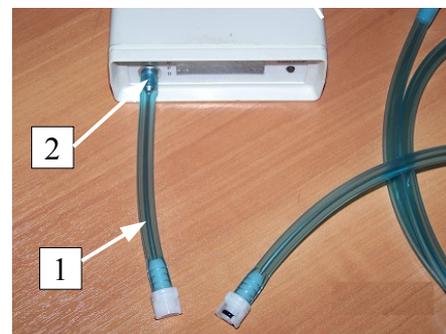

3. соедините короткую (1) и длинную (2) части пневмошланга при помощи разъемного штуцера (3). Для этого соедините две части разъемного штуцера и поверните их друг относительно друга до щелчка.

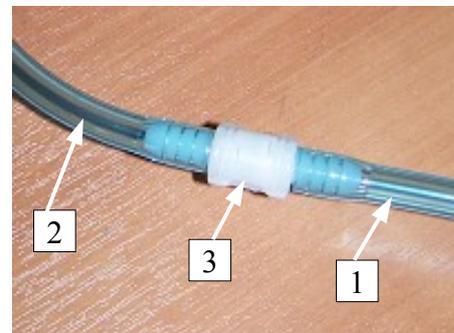

**ВНИМАНИЕ: Отсоединяйте манжету от монитора АД только при помощи разъемного штуцера.** Отсоединение пневмошланга от соответствующих штуцеров монитора АД и манжеты предполагается для обеспечения компрессионной безопасности пациента во время мониторинга АД.

Примечание.

Манжеты, пневмошланг, неразъемный и разъемный штуцеры являются расходными материалами, которые всегда в наличии на складе. Их можно заказать как по отдельности, так и в сборе, сделав дополнительную заявку.