

Программное обеспечение Vasotens Office+

Установка ПО Vasotens Office+

Внимание!

Перед установкой ПО Vasotens Office+ временно отключите антивирусные программы на Вашем ПК, поскольку они могут препятствовать установке некоторых компонентов ПО

Для установки ПО включите ПК и вставьте носитель с ПО из комплекта поставки. Откройте папку Мой компьютер на Рабочем столе Windows, найдите носитель с ПО и запустите программу-инсталлятор ПО, щелкнув мышью по файлу «SetupVO_<номер версии>.exe».

Откроется окно выбора языка установки (Рис. 1). По умолчанию язык будет определен в соответствии с настройками Windows. При необходимости измените язык установки, выбрав его из списка. В окне выбора языка нажмите «ОК».

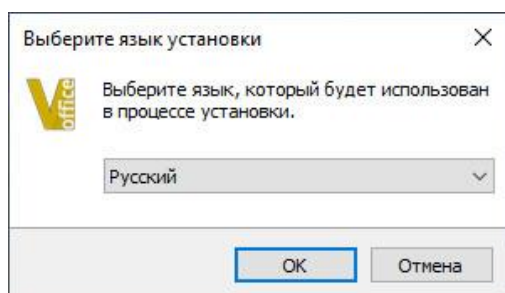


Рис. 1. Окно выбора установки языка

Откроется окно выбора папки установки программы (Рис. 2). Программа установки создаст новую директорию (по умолчанию, C:\Program Files (x86)\VasotensOfficePlus). При необходимости измените директорию установки программы. Нажмите «Далее».

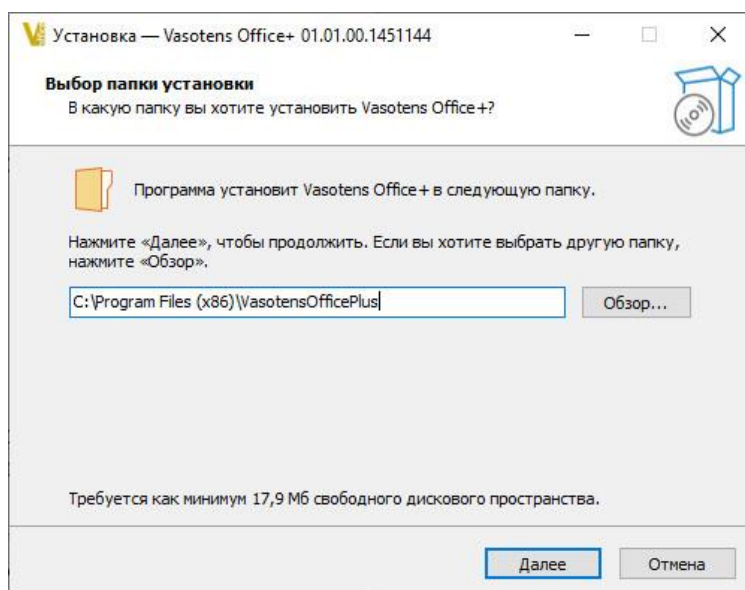


Рис. 2. Окно выбора папки установки программы

Откроется окно выбора папки для хранения данных исследований (Рис. 3). Программа установки создаст новую директорию (по умолчанию, C:\Users\имя_пользователя\Documents\Vasotens data). Нажмите «Далее».

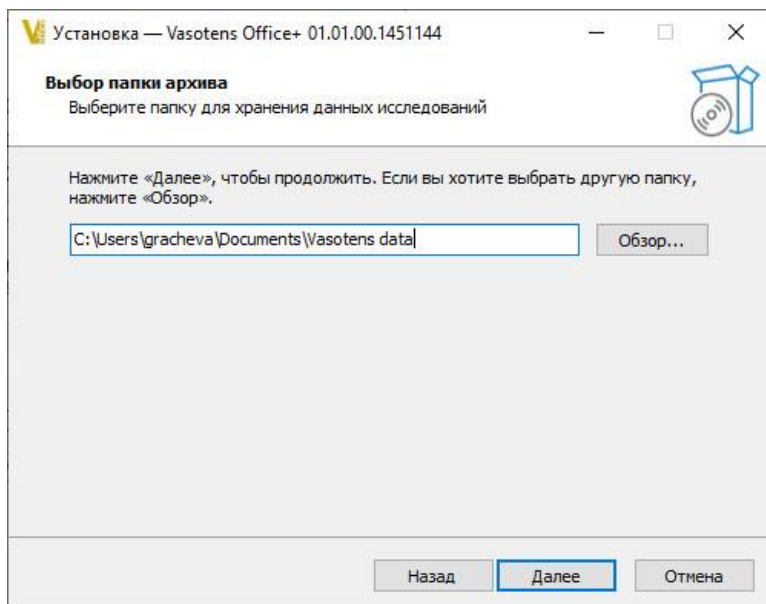


Рис. 3. Окно выбора папки для хранения данных исследований

Откроется окно выбора дополнительных задач (Рис. 4). При необходимости можно выбрать создание значка программы на рабочем столе. Нажмите «Далее».

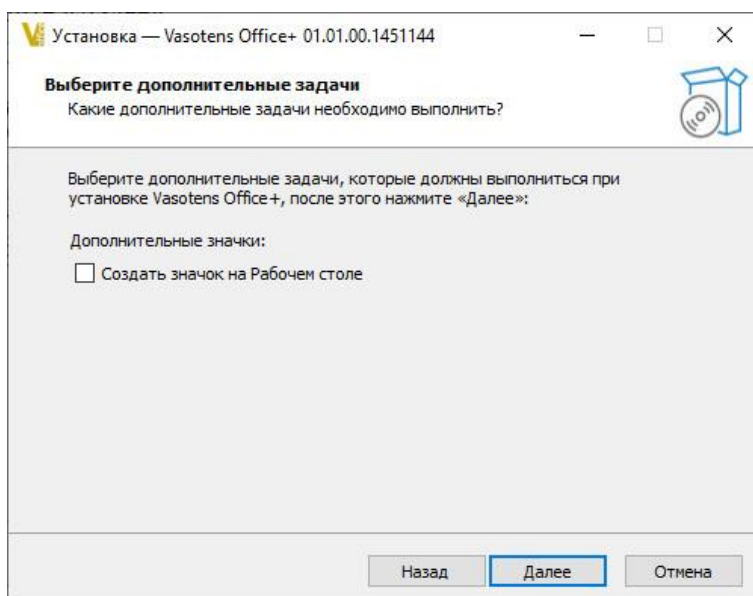


Рис. 4. Окно выбора дополнительных задач

Дождитесь завершения установки ПО.

Далее откроется окно завершения мастера установки Vasotens Office+ (Рис. 5). При необходимости можно запустить программу сразу после её установки.

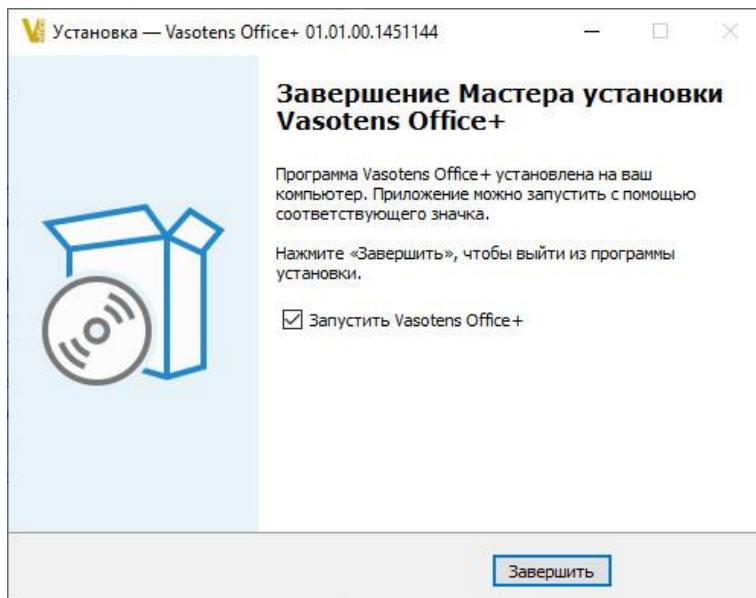


Рис. 5. Окно завершения мастера установки